


ИНСТРУКЦИЯ

по применению, подготовке, уходу, чистке и стерилизации витреоретинальных инструментов.

Для обеспечения нормальной работы инструмента необходимо соблюдение правил обращения, изложенных в данной инструкции:

1. Не допускаются падения, удары и неосторожное касание рабочих кончиков инструмента с твердыми поверхностями.
2. Во время операции внутриглазная жидкость попадает в полости инструмента, что способствует развитию коррозии и заеданию подвижных частей. Поэтому нельзя допускать высыхания и затвердевания попавшей жидкости. Для этого сразу после применения инструмент следует опустить в кювету с дистиллированной водой и держать в ней вплоть до начала промывки .
3. Промывку инструмента производить с помощью шприца и промывочного адаптера. Для этого надо набрать в шприц дистиллированную воду и присоединить к нему адаптер и инструмент так, как показано на рисунках, и прокачать воду через инструмент до выхода воды из трубки наконечника. Затем продуть полости инструмента с помощью шприца воздухом. После этого повторить промывку, но вместо воды применить медицинский спирт и вновь просушить воздухом. Протереть наружные поверхности марлевой салфеткой и проверить работу инструмента, установив его на рукоятку.

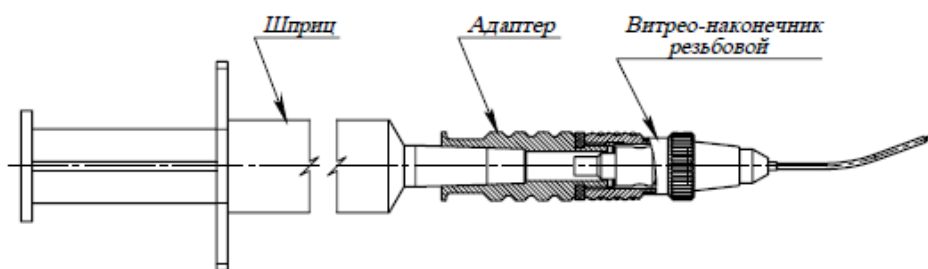

4. Кончики инструмент необходимо смазать силиконовым маслом, для чего поместить рабочие кончики в силиконовое масло на 1 час. После этого осторожно протереть кончики салфеткой и поместить в закрытую ёмкость. Инструмент готов к хранению.
5. Перед использованием необходимо удалить остатки силиконового масла спиртом с помощью шприца и промывочного адаптера и провести температурную стерилизацию при 135°C в течении 10 минут.

При соблюдении правил обращения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 1 года. Если Вы обнаружите производственный дефект, изготовитель отремонтирует инструмент или заменит его на новый.



ООО «ТИТАН МЕДИКАЛ»
420133. а/я 729, Казань, Россия 420054, Казань, ул. Техническая, д.120а ,
Телефон: + 7 903 307-85-72; +7 917 261-08-93 Факс: + 7 843 277 07 78
www.titanmedical.ru e-mail: sales@titanmedical.ru